

Snabbstartsguide



Companion
by Audientes

Allmän information

Companion by Audientes är en avancerad hörsellösning och ett Bluetooth-headset i ett.

Companion by Audientes som är designad och tillverkad i Danmark förbättrar din hörsel när du behöver det som mest: i samtal, vid sociala sammankomster, i telefon, på jobbet, vid bilkörning eller till och med när du kopplar av hemma och tittar på TV eller lyssnar på musik – på din egen volym.

Uppdatering av mjukvara

Audientes kommer då och då att släppa mjukvaruuppdateringar. Dessa uppdateringar kommer automatiskt att göras tillgängliga i Audientes-appen.

Smarttelefon-kompatibilitet

Audientes-appen är kompatibel med:

- Telefoner med Android version 7 eller senare med minst 2 GB RAM
- iPhones med iOS 13.0 eller senare

Kundtjänst


Om du har frågor om din Audientes-produkt eller behöver teknisk hjälp kan du skicka e-post till support@audientes.com.

Kontakta Audientes


Audientes huvudkontor
Teknikerbyen 5
2830 Virum
Danmark

Vad som finns i lådan


HEADSET

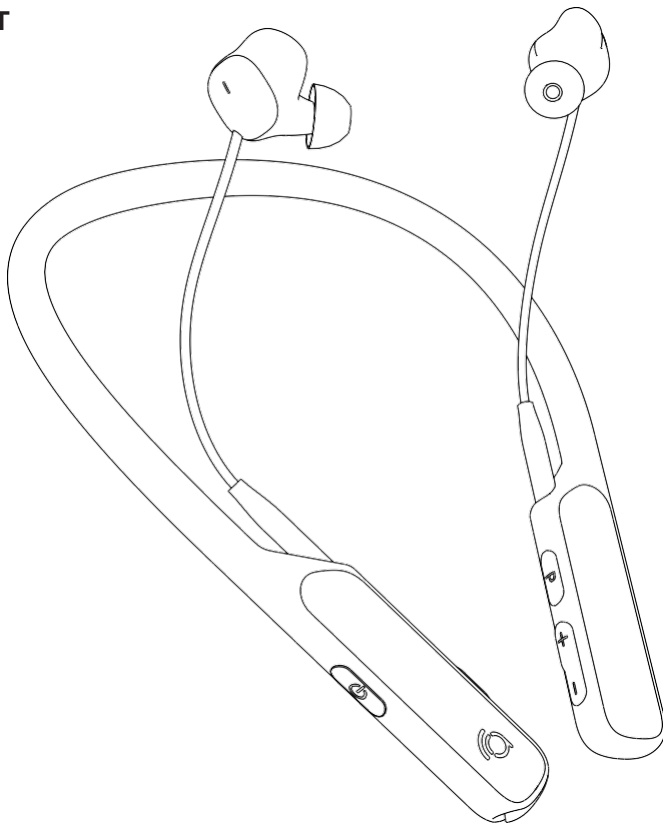


ÖRONKUDDAR I SILIKON

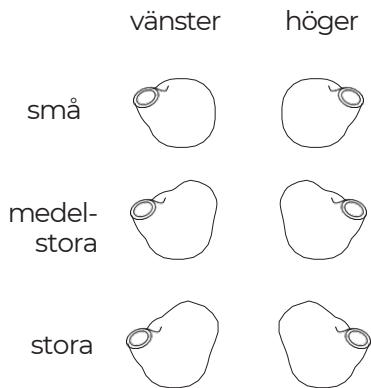


ÖRONTOPPAR I SILIKON

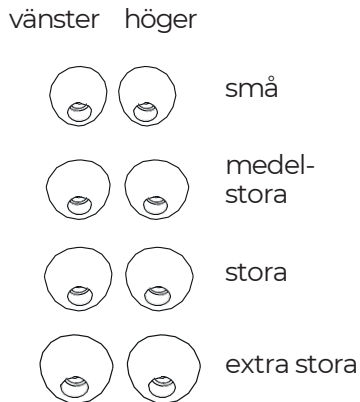

RESPÅSE

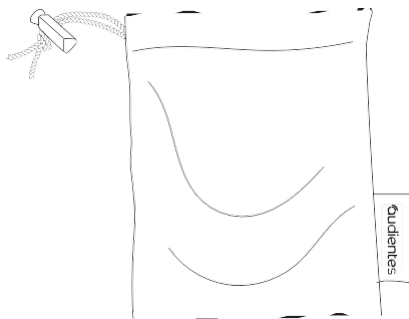


USB-LADDNINGSKABEL

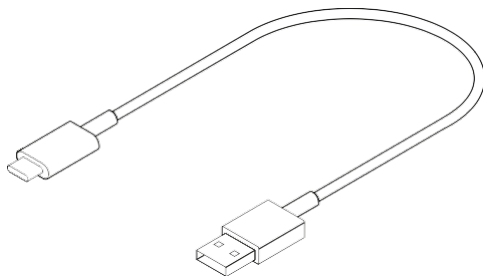


Lär känna Companion

Allt du behöver för att höra bättre är inbyggt i headsetet:


VY FRAMIFRÅN

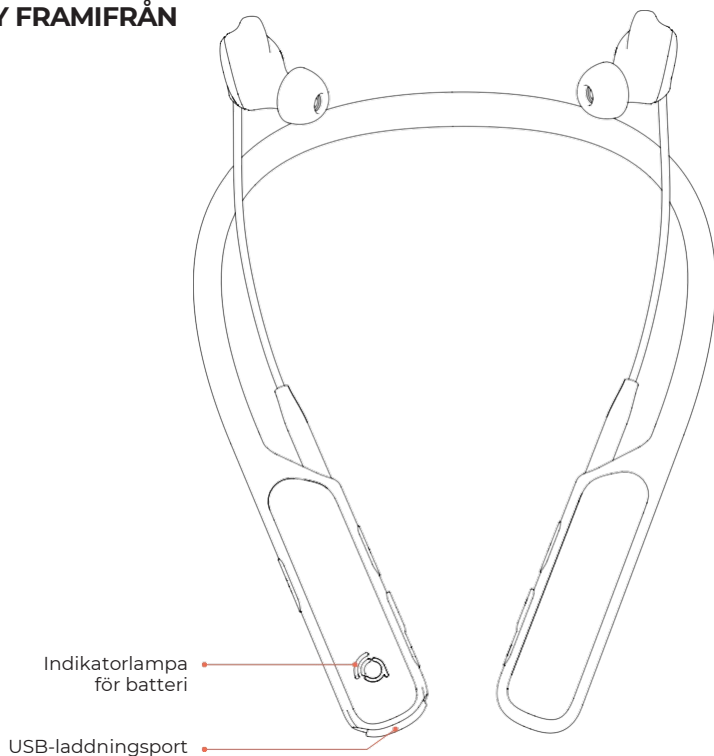

HÖGER SIDA

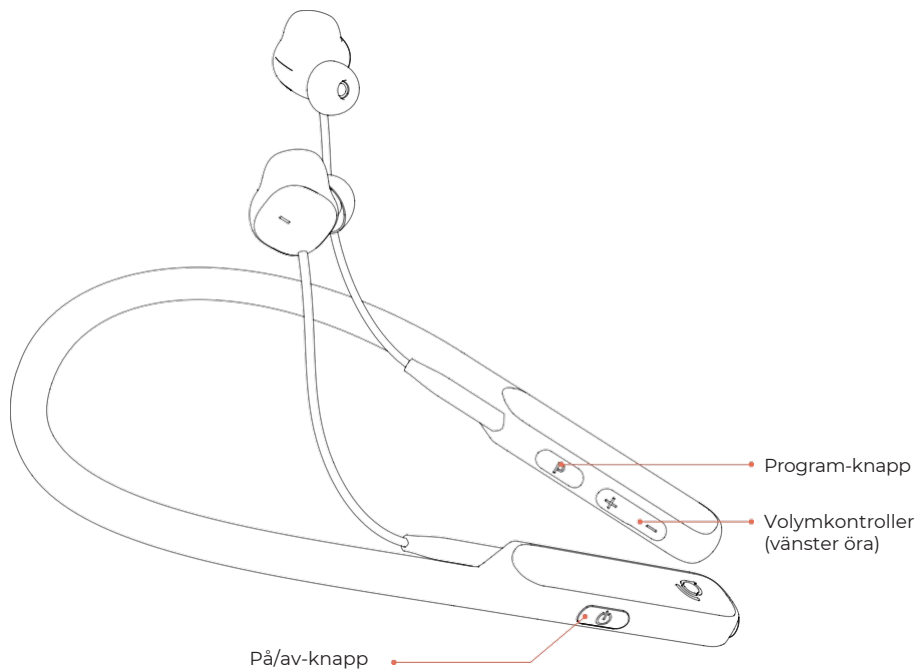

VÄNSTER SIDA

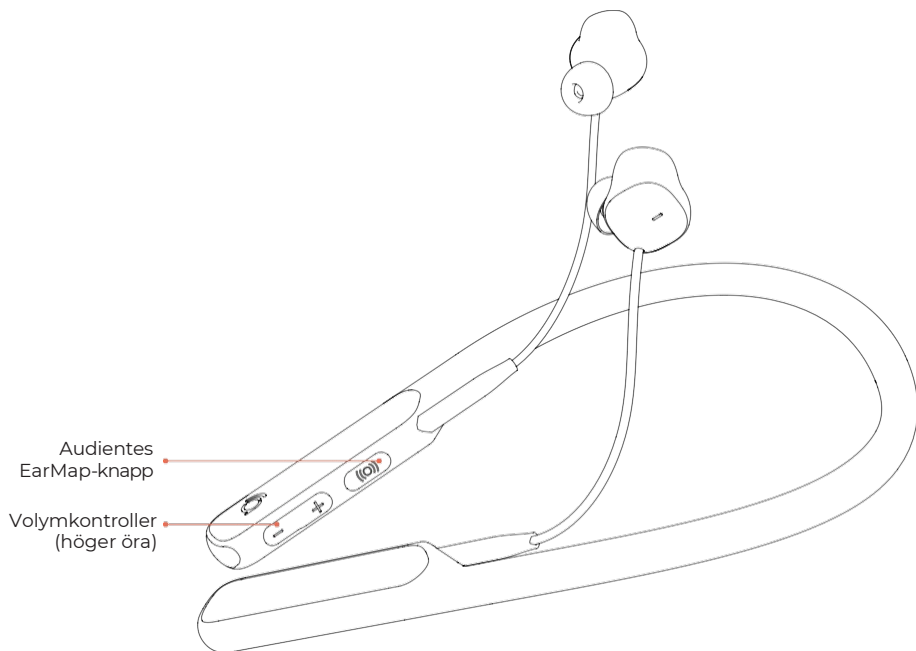


Konfigurera Companion

LADDA HEADSETET

Innan du använder din Companion måste den laddas.

- 1** Anslut den mindre änden av USB-laddningskabeln till USB-porten.

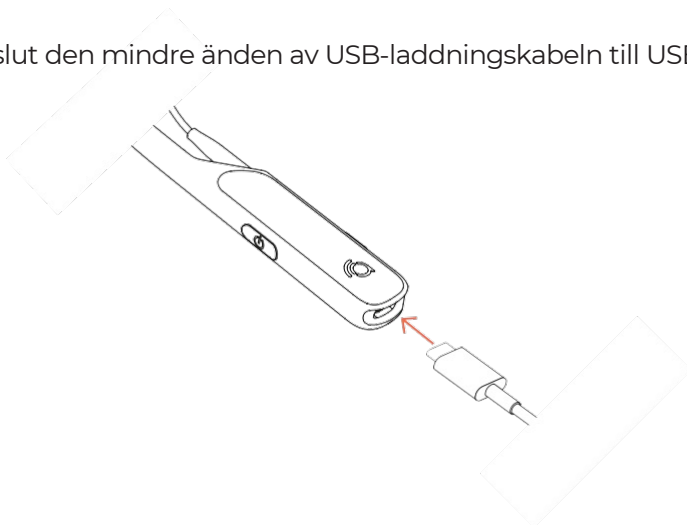


- 2** Anslut den större änden av USB-laddningskabeln till en vanlig USB-adapter [5W/5V/1A] (ingår ej).

Konfigurera Companion

LADDA HEADSETET (FORTSÄTTNING)

- 3 Anslut väggadaptern (ingår ej) till ett eluttag.
- 4 När Companion laddas lyser indikatorlampan fast gul. När Companion är fulladdad blir indikatorlampan grön. Om Companion inte har laddats korrekt, till exempel på grund av höga temperaturer, lyser indikatorlampan fast magenta.

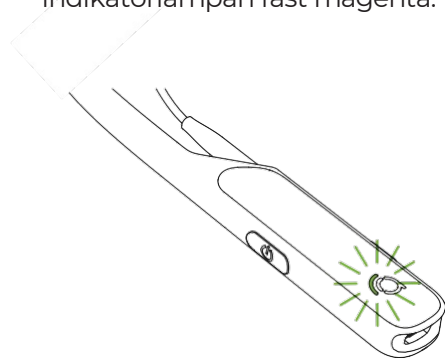

Konfigurera Companion


HITTA RÄTT ÖRONTOPPAR & ÖRONKUDDAR


Din Companion levereras med fyra storlekar av örontoppar: små, medelstora, stora och extra stora, samt tre storlekar av öronkuddar: små, mellanstora och stora.

Din Companion kommer utrustad med medelstora öronkuddar och örontoppar. Om den här storleken inte passar ditt öra kan du prova de små eller större storlekarna.

Hörluren ska sitta bekvämt i örat. Den ska varken sitta för hårt eller för löst.

SLÅ PÅ COMPANION

När headsetet är fulladdat kan du börja använda det. Slå på Companion genom att trycka på knappen  och hålla den intryckt (se sidan 6).

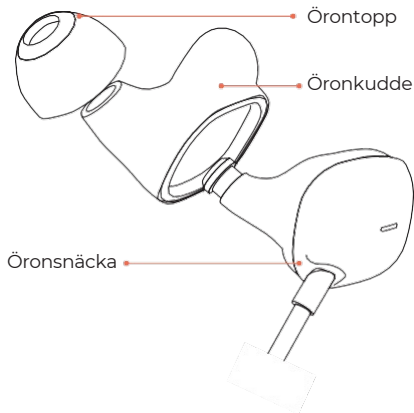

Konfigurera Companion

LADDA NER AUDIENTES-APPEN

För att kunna använda alla funktioner i Companion måste du först ladda ner Audientes-appen. Du bör uppdatera Companion via appen minst en gång i månaden. För att uppdatera Companions fasta programvara gå till Inställningar -> "Uppdatera Audientes mjukvara" -> tryck på den blå knappen för att starta uppdateringen.

Använd appen för att:

- 1 Skapa din Audientes EarMap
- 2 Visa din Audientes EarMap
- 3 Växla mellan olika ljudlägen

Hämta appen genom att skanna QR-koden nedan (med hjälp av kameran på din smarttelefon) eller genom att ladda ner appen från Google Play eller App Store med sökordet "Audientes".



Konfigurera Companion

SKAPA DIN EARMAP

När du först börjar använda Companion måste du skapa din Audientes EarMap. Se till att du befinner dig på en tyst plats innan du startar kartläggningen. Det finns två sätt att skapa din Audientes EarMap:


- A. Använd Audientes-appen
- B. Använd ditt Audientes Companion-headset

A - Använd Audientes-appen

När du har laddat ner Audientes-appen (se sidan 11 för mer information) öppnar du appen på din smarttelefon. Följ skärmens instruktioner för att först ansluta till Companion och sedan skapa din Audientes EarMap.

B - Använd Companion


Följ anvisningarna i nästa avsnitt av den här guiden (se sidan 13). Audientes EarMap tar vanligtvis mindre än 5 minuter att slutföra.

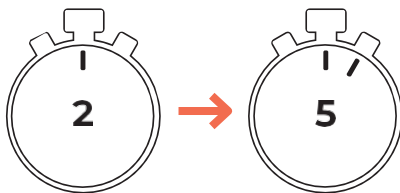

Konfigurera Companion


SLUTFÖR DIN AUDIENTES EARMAP (FORTSÄTTNING)

1

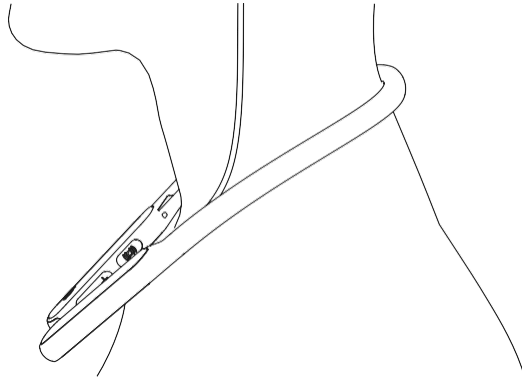

Placera headsetet runt halsen (1) och sätt in hörlurarna i båda öronen (2).

2

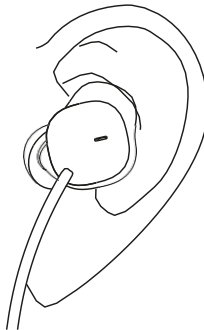

Konfigurera Companion

SLUTFÖR DIN AUDIENTES EARMAP (FORTSÄTTNING)

- 1** Se till att du sitter på en tyst plats där du inte blir avbruten. Tryck på knappen ((O)) i minst en sekund.
- 2** Du får en uppmaning att starta Audientes EarMap. När kartläggningen börjar hörs olika toner i vänster och höger öra. Varje gång du hör en ton ska du snabbt trycka på valfri knapp på headsetet.
- 3** Audientes EarMap är klar när kartläggningen har slutförts i båda öronen. Ett röstmeddelande spelas upp för att meddela när kartläggningen har slutförts.

OBS: För att stoppa kartläggningen innan den är klar trycker du på knappen ((O)) och håller den intryckt.

Konfigurera Companion

HUR COMPANION KOPPLAS IHOP MED EN SMART ENHET

För att parkoppla Companion med en smart enhet, till exempel en smarttelefon, smart-TV eller en ljudenhet via Bluetooth, tryck och håll in knappen P i 4 sekunder. Detta startar parkopplingen. Hitta sedan Bluetooth-inställningarna på smarttelefonen, smart-TV:n eller annan Bluetooth-enhet och sök efter Companion och koppla ihop den.

När du konfigurerar anslutningen för första gången kan det vara nödvändigt att hålla in P-knappen i 4 sekunder för att starta en ny Bluetooth-sökning eller när du byter från att vara ansluten till en enhet till en annan.


Om enheten tidigare har kopplats ihop med en smart enhet går du in i den smarta enhetens Bluetooth-inställningar och glömmer/tar bort/avbryter kopplingen med den parade enheten från Bluetooth-inställningarna.

För att återställa Bluetooth håller du P-knappen intryckt i 8 sekunder. Detta raderar alla tidigare Bluetooth-parningar och startar en ny parkoppling.

Använda Companion

När du har slutfört Audientes EarMap är Companion redo att användas. Här är några tips om hur du använder din Companion:

- 1 Justera volymen.** Använd volymknapparna för att justera ljudnivåerna för varje öra.

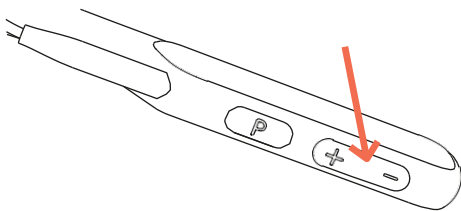

- 2 Välja ljudläge.** Companion har ett flertal olika program som är utformade för att hjälpa dig höra klart och tydligt i olika situationer. Tryck på **P**-knappen för att växla mellan programmen.
- 3 Ytterligare funktioner för knapparna på Companion:**
 - Tryck på **P**-knappen i 4 sekunder: startar en ny Bluetooth-koppling för att ansluta till en smarttelefon eller liknande.
 - Tryck på **P**-knappen i 8 sekunder: tar bort tidigare Bluetooth-koppling och startar en ny parkoppling.
 - Tryck ner På/Av- och **P**-knappen i 15 sekunder för att återställa Companion (detta tar också bort eventuell Audientes EarMap som skapats).

Använda Companion

- 4 Ladda Companion.** Den magenta indikatorlampan (se sidan 9) blinkar när du behöver ladda Companion. Du kommer också att höra ett röstmeddelande som säger "Låg batterinivå". Du kan alltid kontrollera batterinivån genom att snabbt trycka på knappen .

BATTERISTATUS

Tryck kort på startknappen och om indikatorlampan blir:	Har du:
Grön	Ett laddat batteri
Gul	Några timmar kvar
Magenta	Några minuter kvar
Magenta och blinkar	Ett batteri som bör laddas snarast

FCC-VARNING:

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnad kan resultera i att användaren frångår rätten att utnyttja utrustningen.

Den här enheten uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning får ske på följande två villkor: (1) denna enhet får inte orsaka skadlig störning, och (2) denna enhet måste klara eventuell störning, inklusive störningar som kan orsaka oönskad användning.

VIKTIG ANMÄRKNING:

OBS: Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla kraven för en digital enhet i klass B enligt del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränsvärden är avsedda att ge ett godtagbart skydd mot skadliga störningar vid installation i bostäder. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvent energi. Om den inte installeras och används i enlighet med anvisningarna kan radiokommunikation utsättas för skadliga störningar. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kan inträffa i någon enskild installation. Om den här utrustningen orsakar skadliga störningar i radio- eller TV-mottagningen, vilket kan fastställas genom att slå av och på utrustningen, uppmanas användaren att försöka åtgärda störningarna genom att göra en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta den mottagande antennen
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren
- Anslut utrustningen till ett uttag i en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp

FCC:s uttalande om exponering för strålning:

Den här utrustningen uppfyller FCC:s gränsvärden för strålningsexponering i en okontrollerad miljö.

IC-VARNING:

Den här enheten följer ISED Kanadas licensfria RSS. Användning får ske på följande två villkor:

- (1) den här enheten får inte skapa störningar, och
- (2) den här enheten måste ta emot alla störningar, inklusive störningar som kan leda till att enheten inte fungerar som förväntat.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil n' doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Enheten uppfyller riktlinjerna för RF-exponering. Användare kan få kanadensisk information om RF-exponering och efterlevnad.

Le présent appareil est conforme Après examen de ce matériel aux conformité ou aux limites d'intensité de champ RF, les utilisateurs peuvent sur l'exposition aux radiofréquences et la conformité and compliance d'acquérir les informations correspondantes.

www.audientes.com