

Audiol®

Olivoljespray

SE

Audiol® spray är en enkel och effektiv metod för att mjuka upp eller ta bort öronvax på ett naturligt sätt och därmed minska behovet av att spola rent örat eller för att underlätta innan spolning. Audiol® spray har ett enkelt men unikt doseringssystem som ger en exakt dos av olivolja i ytterörat vilket minskar risken för överdosering, spill och kladd. Var god läs denna bipacksedel noga innan du använder Audiol® spray.

INNAN DU ANVÄNDER EN NY FLASKA AUDIOL® SPRAY

Innan du använder en ny flaska Audiol® spray, värm den i handen, skaka noga och pressa ner doseringspumpen 3-4 gånger innan första dosen. (Se bild b). Var noga med att inte rikta pumpen mot dig eller någon annan. Detta förfarande förbereder systemet och gör produkten klar för användning.

HUR DU ANVÄNDER AUDIOL®

- Audiol® är effektivast när den värmts i handen och skakats innan användning.
- Använd Audiol® efter din audionoms, läkares eller sköterskas anvisningar.
- Dosering till vuxna och barn över 12 år är 1-2 sprayningar Audiol® 2 gånger dagligen i 4-5 dagar innan vaxborttagning. Därefter kan audionom, läkare eller sköterska rekommendera dig att använda Audiol® 1 gång i veckan i förebyggande syfte.
- Ta tag i överdelen av ytterörat och dra uppåt-bakåt (Se bild a), håll flaskan upprätt med munstycket i hörselgången, tryck ner doseringspumpen helt 1-2 gånger. (Se bild b).
- Massera försiktigt tragus precis framför örat. (Se bild a)
- Upprepa proceduren med det andra örat vid behov.
- Doseringspumpen kan tas bort och sköljas i varmt vatten efter användning och därefter sättas på plats igen.

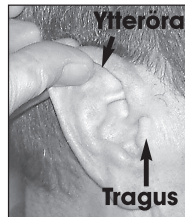


Bild a



Bild b

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

- Patienter med perforerad trumhinna eller öronvärk ska använda Audiol® endast under medicinsk övervakning.
- Audiol® spray ska inte användas av barn under 1 år utan läkarordination.
- Olivolja är en naturprodukt och har ett brett användningsområde. Inga biverkningar har rapporterats med denna produkt, inte heller ihop med andra mediciner. Du bör emellertid inte använda Audiol® om du vet att du är känslig eller allergisk mot olivolja.
- Det finns inga kända bieffekter vid användning under graviditet och amning men du ska alltid informera din läkare eller audionom innan användning.
- Det finns inga kända biverkningar vid över- eller underdosering av Audiol®.
- Om du upplever någon typ av allergisk reaktion ska du omedelbart upphöra med produkten och kontakta läkare.

VARNING

- Audiol® är enbart för en användare.
- Förvara alltid Audiol® sprayen upprätt och i normal rumstemperatur.
- Produkten ska användas inom 3 månader efter första appliceringen.
- Källsorteras enligt anvisning från din kommun.
- Använd inte i närheten av öppen eld.
- Förvara alltid mediciner utom räckhåll för barn.
- Audiol® får endast användas i hörselgången, aldrig nära ögon, i näsan eller i munnen.

**Audiol® Olivspray tillverkas i UK av HL Healthcare Ltd
10 Hazelwood Road, Hale, Cheshire WA15 9AX.**

Audiol® är ett registrerat varumärke av HL Healthcare
Bipacksedeln skapad oktober 2010. Ref: MP00733

MP00733