

# Starkey Avfuktare För Hörapparater

Tar bort fukt från alla typer av i-örat och bakom-örat hörapparater. Går att återanvända om och om igen.

## Instruktionsanvisning:

- Ta ut batteriet ur hörapparaten.
- Placera hörapparaten i burken ovanpå skumlocket.
- Stäng burken.
- Låt hörapparaten ligga t.ex. över natten.
- När du vill använda hörapparaten igen, ta ut den ur burken och sätt i batteriet igen.

De blå kulorna i burken ändrar färg när de absorberat en viss mängd fukt, de blir då rosa. Det går att torka dem för att sedan kunna fortsätta använda avfuktaren som vanligt.



## Torkning av kulorna.

Det går att torka dem endera i mikrovågsugn eller i vanlig ugn.

### Mikrovågsugn:

Sprid ut kulorna i ett kärl som tål mikro.

Mikra kulorna på hög effekt i 3 minuter. Om vissa kulor fortfarande är rosa efter 3 minuter, mikra ytterligare 3 minuter. Repetera tills alla kulor är blå.

### Vanlig ugn:

Sprid ut kulorna i ett ugnstålkärl. Sätt ugnen på 150°C och låt kulorna torka i ugnen i 3 timmar.

### Varning:

Håll alltid burken stängd och utom räckhåll för barn.

Placera inte över öppen eld.

Placera aldrig hela burken i ugnen, endast kulorna.

Om kulorna svalts – drick två glas vatten och framkalla kräkning.

Innehåll: 100 % Indikerande Silikongel